

Merkblatt „Orthopädische Einlagen“ „Orthopädische Fussbettungen“ als Einbau in Konfektionsschuhen

Mit Ihren neuen Einlagen haben Sie ein medizinisches Hilfsmittel erhalten. Das gelieferte Hilfsmittel ist eine Sonderanfertigung im Sinne des Medizin-Produkte Gesetzes (MPG) und entspricht den Anforderungen des Anhangs I der EG Richtlinie 93/42/EWG.

Bitte beachten Sie daher die nachfolgenden Gebrauchshinweise:

Angewöhnung an die Einlagen Die Füsse müssen sich an die korrigierende Wirkung der Einlage erst gewöhnen. Tragen Sie sie am Anfang nur kürzere Zeit und steigern Sie kontinuierlich. Nach ca. 2 Wochen sollten sie ganztags bequem getragen werden können.

Kontrolltermin

- Wenn vorhandene Schmerzen nicht nachlassen oder nicht wesentlich besser werden	nach 2 Wochen
- Zur eventuellen Auffrischung oder Erneuerung	nach 1 – 2 Jahren
- Bei Kindern bei starkem Wachstum oder spätestens nach einem Jahr.	nach 6 Monaten

Bei Korrekturen/Änderungen oder Kontrollterminen muss vorgängig ein Termin vereinbart werden!

Pflege Jeden Abend sollten Sie die Einlagen aus den Schuhen zum „Lüften“ herausnehmen. Die Oberfläche darf mit einem feuchten Tuch gesäubert werden. Legen Sie die Einlagen niemals zum Trocknen auf einen warmen Heizkörper oder an die Sonne.

Einlagen und Schuhe **Schuhe und Einlagen sollen eine Einheit bilden.** Es gibt spezielle Schuhe mit erhöhtem und verstärktem Schaft, die die Wirkung der Einlage unterstützen. Eine breite Auswahl steht für Sie in unserem Verkaufsraum zur Anprobe bereit.

Anmessen neuer Einlagen Bringen Sie unbedingt die letzten Einlagen und getragene Schuhe mit! Rufen Sie an und vereinbaren Sie einen Termin, damit wir Ihnen und Ihrem Wohlbefinden genug Zeit widmen können.

Achtung Diabetiker **Weisen Sie bei jedem Besuch darauf hin, dass Sie Diabetiker sind.**